

Indicacions per l'extracció

- Extracció centralitzada en 5 punts:

- Consulta externa de Mutua
- Consulta externa CST
- Consulta externa FHSDJM
- ASSIR Sant Fèlix
- ASSIR Cerdanyola



- Tub especial que s'ha de guardar a **T^a ambient i posició vertical**
- Extreure la mostra de sang per punció venosa amb Vacutainer evitant el contraflux.
- Mantenir el braç del pacient en posició descendent i sostenir el tub de manera que el seu contingut no entri en contacte amb el tap ni amb l'extrem de l'agulla.
- Afluixar el torniquet de seguida que la sang comenci a fluir dintre del tub o en menys de 2 minuts des de la seva aplicació.
- **Emplenar completament** el tub (10ml)
- Retirar el tub de l'adaptador i barrejar immediatament invertint-lo amb suavitat al menys 10 vegades
- Identificar el tub amb la etiqueta Catlab del tub de sèrum

Indicacions pel transport

- Enviar a dins del contenidor especial
- Embolicar el tub en una gasa per evitar que es trenqui



- Fonamental que a dins d'aquest contenidor també hi sigui la **sol·licitud per la prova feta pel ginecòleg.**